

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Instrumentais para uso médico de uso manual.

Os instrumentais são fornecidos não estéreis, comercializados individualmente, embalados em envelope plástico com instrução de uso e etiqueta de rastreabilidade.

2. INDICAÇÃO DE USO

Auxílio em procedimento cirúrgico para colocação dos implantes médicos da CPMH, o qual deve ser necessariamente conduzido por profissional médico com conhecimentos da técnica cirúrgica e dos aspectos mecânicos do instrumental.

3. MODELOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C40001	Cabo em T;
C40002	Cabo com engate rápido;
C40003	Martelo;
C40004	Engate universal;
C40005	Chave combinada;
C40006-25	Chave Hexagonal SW 2,5;
C40006-30	Chave Hexagonal SW 3,0;
C40006-35	Chave Hexagonal SW 3,5;
C40006-40	Chave Hexagonal SW 4,0;
C40006-45	Chave Hexagonal SW 4,5;
C40006-50	Chave Hexagonal SW 5,0;
C40007	Chave de Fenda com Pino;
C40008	Impactor;
C40009	Chave soquete;
C40010	Barra tensionadora;
C40011	Dispositivo de tensão;
C40012	Extrator;
C40014	Disco do martelo em aço;
C40015-15	Extrator de parafuso espanado 1,5 e 2,0mm;

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES

C40015-27	Extrator de parafuso espanado 2,7 / 3,5 e 4,0mm;
C40015-45	Extrator de parafuso espanado 4,5 / 50 / 6,5 e 7,0mm;
C40017-15	cone de extração para parafuso 1,5mm;
C40017-20	cone de extração para parafuso 2,0mm;
C40017-27	cone de extração para parafuso 2,7mm;
C40018-35	cone de extração para parafuso 3,5 / 4,0mm;
C40018-45	cone de extração para parafuso 4,5mm;
C40018-50	cone de extração para parafuso 5,0 / 6,5 e 7,0mm;
C40019-15	Trefina extra para parafuso 1,5mm;
C40019-20	Trefina extra para parafuso 2,0 mm;
C40019-27	Trefina extra para parafuso 2,7mm;
C40019-35	Trefina extra para parafuso 3,5 / 4,0mm;
C40019-45	Trefina extra para parafuso 4,5 mm;
C40019-50	Trefina extra para parafuso 5,0 / 6,5 e 7,0mm;
C40020-15	Pino central para parafuso 1,5mm;
C40020-20	Pino central para parafuso 2,0 mm;
C40020-27	Pino central para parafuso 2,7mm;
C40020-35	Pino central para parafuso 3,5 / 4,0mm;
C40020-45	Pino central para parafuso 4,5 mm;
C40020-50	Pino central para parafuso 5,0 / 6,5 e 7,0mm;
C40021	Cabo com engate em T Grande;
A40303-15	Chave Hexagonal SW 1,5;
A40303-20	Chave Hexagonal SW 2,0;
A40303-25	Chave Hexagonal SW 2,5;
A40303-30	Chave Hexagonal SW 3,0;
A40303-35	Chave Hexagonal SW 3,5;
A40303-40	Chave Hexagonal SW 4,0;
A40303-45	Chave Hexagonal SW 4,5;

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES

A40303-50	Chave Hexagonal SW 5,0;
A40304-4	Chave Torx T4 1,28mm;
A40304-6	Chave Torx T6 1,70mm;
A40304-8	Chave Torx T8 2,31mm;
A40304-10	Chave Torx T10 2,74mm;
A40304-15	Chave Torx T15 3,27mm;
A40304-20	Chave Torx T20 3,86mm;
A40304-25	Chave Torx T25 4,43mm;
A40304-30	Chave Torx T30 5,52mm;
A40305-21	Chave Torx 2,1mm;
A40305-26	Chave Torx 2,6mm;
A40305-31	Chave Torx 3,1mm;
A40305-37	Chave Torx 3,7mm;
A40306-12	Chave Quadrada SQ 1,2mm;
A40306-15	Chave Quadrada SQ 1,5mm;
A40307-25	Chave Cruciforme PH 2,5mm;
A40307-35	Chave Cruciforme PH 3,5mm;
A40308-05	Chave Boca ST $\varnothing$ 2.5~ $\varnothing$ 4.0;
A40308-08	Chave Boca ST $\varnothing$ 6.0;
A40309-6	Chave Soquete SW 6,0mm;
A40309-7	Chave Soquete SW 7,0mm;
A40309-72	Chave Soquete SW 7,2mm;
A40309-8	Chave Soquete SW 8,0mm;
A40311-15	Extrator de Parafuso Espanado SW 1,5mm;
A40311-20	Extrator de Parafuso Espanado SW 2,0mm;
A40311-25	Extrator de Parafuso Espanado SW 2,5mm;
A40311-30	Extrator de Parafuso Espanado SW 3,0mm;
A40311-35	Extrator de Parafuso Espanado SW 3,5mm;

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES

A40311-40	Extrator de Parafuso Espanado SW 4,0mm;
A40311-45	Extrator de Parafuso Espanado SW 4,5mm;
A40311-50	Extrator de Parafuso Espanado SW 5,0mm;
A40312-15	Trefina extra para parafuso 1,5mm;
A40312-20	Trefina extra para parafuso 2,0mm;
A40312-27	Trefina extra para parafuso 2,7mm;
A40312-35	Trefina extra para parafuso 3,5mm;
A40312-45	Trefina extra para parafuso 4,5mm;
A40312-60	Trefina extra para parafuso 6,0mm;
A40313-35	Cone de Extração para Parafuso 3,5mm;
A40313-45	Cone de Extração para Parafuso 4,5mm;
A40313-60	Cone de Extração para Parafuso 6,5mm;
D40001	Guia de Broca para tornozelo;
D40002	Template Plataforma reta 5 pinos;
D40003	Template Plataforma reta 3 pinos;
D40004	Template Plataforma T 5 pinos;
D40005	Template Plataforma T 3 pinos;
D40006	Template Plataforma Micrometrica;
D40007	Template Plataforma Universal;
D40008	Template Plataforma correção Of Garches;
D40009	Template Plataforma reta dupla;
D40010-1	Fio Guia com Oliva Central;
D40010-2	Fio Guia com Oliva Central;
D40010-3	Fio Guia com Oliva Central;
D40010-4	Fio Guia com Oliva Central;
D40010-5	Fio Guia com Oliva Central;
D40010-6	Fio Guia com Oliva Central;
D40010-7	Fio Guia com Oliva Central;

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES

D40010-8	Fio Guia com Oliva Central;
D40010-9	Fio Guia com Oliva Central;
D40011-1	Fio Guia;
D40011-2	Fio Guia;
D40011-3	Fio Guia;
D40011-4	Fio Guia;
D40011-5	Fio Guia;
D40011-6	Fio Guia;
D40011-7	Fio Guia;
D40011-8	Fio Guia;
D40011-9	Fio Guia;
D40012-1	Fio Guia;
D40012-2	Fio Guia;
D40012-3	Fio Guia;
D40012-4	Fio Guia;
D40012-5	Fio Guia;
D40012-6	Fio Guia;
D40012-7	Fio Guia;
D40012-8	Fio Guia;
D40012-9	Fio Guia;
D40012-10	Fio Guia;
D40012-11	Fio Guia;
D40012-12	Fio Guia;
D40012-13	Fio Guia;
D40012-14	Fio Guia;
D40013-1	Fio Guia com Oliva Lateral;
D40013-2	Fio Guia com Oliva Lateral;
D40013-3	Fio Guia com Oliva Lateral;

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES

D40013-4	Fio Guia com Oliva Lateral;
D40013-5	Fio Guia com Oliva Lateral;
D40013-6	Fio Guia com Oliva Lateral;
D40013-7	Fio Guia com Oliva Lateral;
D40013-8	Fio Guia com Oliva Lateral;
D40013-9	Fio Guia com Oliva Lateral.

4. ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- Os dispositivos da FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES deverão ser armazenados nos respectivos recipientes.
- Antes da utilização, inspecione os dispositivos, de tal forma a detectar qualquer sinal de desgaste originado por uma utilização normal ou qualquer dano potencial.
- Caso seja utilizado um sistema de cadência temporária, torna-se necessário verificar cuidadosamente, antes de qualquer utilização, se todos os dispositivos estão completos, e se nenhum dispositivo evidencia qualquer sinal de dano.
- As embalagens, os acondicionamentos e/ou os produtos danificados não deverão ser utilizados e deverão ser devolvidos à CPMH.
- Os dispositivos devem ser armazenados em local limpo, seco e a uma temperatura adequada.
- Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-16/2013.

5. INSTRUÇÕES DE USO

Toda manipulação destes instrumentais, deverá estar acompanhada de cuidados: na manipulação para limpeza e esterilização, bem como seu transporte. Esses instrumentais devem ser usados somente para a finalidade específica que foi projetada. Inspeccionar todo e qualquer dispositivo antes de o utilizar, de modo a verificar visualmente se o mesmo não se encontra danificado. O produto deve ser manipulado por profissionais qualificados e familiarizados com a técnica cirúrgica em ambiente asséptico.

6. PRECAUÇÕES

- A aplicação de força ou impacto sobre os instrumentos pode causar rompimento, fissura, dobramento, rachadura ou até mesmo quebra do mesmo, levando à sua inutilização.
- Não usar para qualquer outro propósito diferente de seu uso recomendado. Manipular tecidos delicados ou ossos com um instrumento que não foi feito para tal uso pode resultar em danos ao instrumento.
- Deve-se levar em conta que os instrumentos possuem risco de contaminação potencial. Os profissionais que entrarem em contato com os instrumentos devem tomar medidas de precauções contra perfurações causadas por estes.
- Após utilização dos instrumentais estes devem ser tratados como possíveis contaminantes. Descartar após o uso de maneira apropriada.
- Os instrumentos não devem ser utilizados para finalidades daquelas para as quais não foram projetados.

FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES

- Os instrumentais servem exclusivamente para auxílio médico. Instrumentais de fabricantes diferentes podem ser utilizados em associação somente quando a compatibilidade e adequabilidade entre eles for previamente avaliada.

7. PRÉ-OPERATÓRIO

A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do implante a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atende pelas condições de uso e limpeza. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

8. ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar o produto caso apresente danos aparentes ou caso a sua embalagem esteja violada ou danificada.
- Como todo ato cirúrgico, o cirurgião deve estar ciente que podem haver intercorrências durante o procedimento, e deve estar preparado para tratá-las. O uso destes instrumentais deve ser feito apenas por médicos cirurgiões aptos e familiarizados com a técnica cirúrgica.
- Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para fins escusos ao projeto podem prejudicar a evolução do procedimento e danos ao implante.
- A combinação dos produtos da CPMH com os de outros fabricantes pode apresentar riscos de uma fixação inadequada e outras complicações técnicas por diferenciação de material, desenho ou qualidade.
- Os instrumentais são componentes metálicos que estão sujeitos a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessária a inspeção e revisão das condições de uso do conjunto de instrumentos ou das suas partes. Caso ocorram variações no desempenho pretendido, perda de precisão, instabilidade ou falta de corte, o componente deve ser imediatamente substituído.

9. RISCOS ASSOCIADOS

O produto é contraindicado apenas para uso por profissionais não habilitados para a função.

10. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO E LIMPEZA

Autoclave ou Óxido de Etileno.

11. DESCARTE

O descarte deverá ser realizado inicialmente pela descaracterização do produto através de corte e/ou imagem para sua inutilização. Providenciar o descarte conforme as normas para lixo hospitalar, devendo ser depositado em recipiente adequado e tendo a indicação de que se trata de lixo contaminado. A instituição de saúde por sua vez deverá providenciar o descarte final conforme legislação em vigor.

12. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

Elogios, Sugestões ou Reclamações podem ser realizados diretamente à CPMH pelo telefone (61) 3028-8858, pelo e-mail: sac@cpmh.com.br, ou em nosso sítio eletrônico preenchendo o formulário de



FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES

atendimento do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no endereço eletrônico:
<https://www.cpmh.com.br/sac/>.

Esta Instrução de Uso pode ser solicitada a qualquer momento através do e-mail qualidade@cpmh.com.br ou telefone (61) 3028-8883, onde será disponibilizada a versão mais recente via e-mail ou por remessa postal, sem custos de envio.

NOTA: Informações referentes à data de fabricação, validade, lote e referência vide rótulo.



FABRICANTE

CPMH – Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda.

Endereço: SIA Trecho 17 Via IA-4 Lote 1235

CEP 71200-260

www.cpmh.com.br

Tel: 61 3028-8858

sac@cpmh.com.br

Registro ANVISA: 80859840064

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rander Pereira Avelar – CRO/DF: 5476