



Guia Cirúrgico

Nome Técnico: Dispositivo para fixação maxilar

Indicação de Uso

Consiste de um guia cirúrgico, dispositivo temporário indicado como auxiliar ao ato cirúrgico, utilizada no transoperatório para o posicionamento estável da maxila e/ou mandíbula numa posição previamente definida para sua fixação rígida, comumente utilizando-se de placas e parafusos para este fim.

Modo de Uso

O cirurgião inicia o ato cirúrgico, realiza a osteotomia do segmento a ser inicialmente operado, após a total liberação óssea coloca a guia cirúrgica em contato com as superfícies dentárias superiores e inferiores, fazendo com que o segmento ósseo submetido a osteotomia, portanto, liberado (solto) possa ser posicionado no local previamente definido, têm-se como referência para a correta posição o segmento não operado. O contato da guia ocorre somente com as superfícies dentárias e por alguns minutos durante o ato cirúrgico.

Princípio de Funcionamento

O funcionamento da guia cirúrgica ocorre com a intercuspidação dos dentes dos arcos superiores e inferiores, fazendo com que o segmento ósseo submetido a osteotomia, portanto, liberado (solto) possa ser posicionado no local previamente definido, têm-se como referência para a correta posição o segmento não operado. O contato da guia ocorre somente com as superfícies dentárias e por alguns minutos durante o ato cirúrgico.

Composição

O produto é fabricado em PMMA em acordo com a Norma Técnica ISO 22112/2005.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL

FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO

Esterilização

O fabricante recomenda esterilizar este produto em Sterrad® no ciclo padrão.

Advertências/Precauções

- Não utilizar o produto se o mesmo estiver danificado. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada.
- O cirurgião deve estar familiarizado e deter conhecimentos suficientes de cirurgias de correção e suas limitações, incluindo o pré e pós operatório, técnica cirúrgica adotada, precauções e riscos potenciais.
- Os procedimentos pré-operatórios e cirúrgicos, incluindo o conhecimento da técnica cirúrgica, seleção e a colocação apropriada, são considerações importantes para a utilização bem sucedida do Guia Cirúrgico.
- Os produtos podem apresentar distorções se forem submetidos à esterilização por Autoclave.

Contra Indicações

Paciente alérgico à PMMA.

NOTA: Informações referentes à data de fabricação, validade, lote e referência vide rótulo.



FABRICANTE

CPMH – Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda-Epp.

Endereço: SAAN QUADRA 02, PARTE 1, N.º 265 – Brasília/DF

CEP 70632-240

www.cpmh.com.br

Tel: 61 3028-8855

sac@cpmh.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rander Pereira Avelar – CRO/DF: 5476